



## Gebrauchshinweise für die Augenspülflaschen

### BARIKOS KS & Mini-BARIKOS KS

Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten.

BARIKOS Augenspülflaschen nach DIN EN 15154-4 dienen zum Ausspülen von Fremdkörpern und Fremdstoffen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Die Spülung ersetzt nicht die augenärztliche Untersuchung. Die Augenspülflasche an geeignetem Ort griffbereit halten, vor Kälte, Sonnenbestrahlung und Hitze schützen!

Mögliche Ersthelfer sind in der Handhabung zu unterweisen!

#### Im Anwendungsfall:

1. **Verschlusskappe entfernen**
2. **über die Flasche beugen oder Flasche über das betroffene Auge halten**
3. **Augenränder mit Daumen und Zeigefinger möglichst weit auseinanderziehen**
4. **Sprühkopf leicht gegen die Augenhöhle drücken, dabei das Auge offen halten und durch wiederholtes Zusammendrücken der Flaschenwände reichlich spülen!**
5. **Bei starken Verätzungen bis zur ärztlichen Versorgung weiterspülen, ggf. mit mehreren Augenspülflaschen!**

Bei reflektorischem Augenlidverschluss ist der Verunfallte oft nicht in der Lage, selbst ausreichend zu spülen. In solchen Fällen muss der nächste erreichbare Helfer „Erste Hilfe“ leisten.

Die Augenspülflaschen sind in regelmäßigen Zeitabständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Dabei ist auch auf die Unversehrtheit des Schutzsiegels zu achten.

Nach Gebrauch ist der Restinhalt oder nach Öffnen der Flasche auch bei Nichtgebrauch (erkennbar an einer Verletzung des Siegels) der Gesamtinhalt zu verwerfen.

Die Haltbarkeit der Spülflüssigkeit beträgt 2 Jahre, sofern die Flasche verschlossen bleibt und das Schutzsiegel unbeschädigt ist. Das Ablaufdatum ist auf der Flasche angegeben



BARIKOS KS 620 ml      EN15154-4    Art.-Nr. 954004  
Mini-BARIKOS KS 175 ml    EN15154-4    Art.-Nr. 954005

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH  
Richard-Byrd-Straße 23, D-50829 Köln  
Telefon +49(0)221/59777-200  
[www.barikos.de](http://www.barikos.de) – [mail@barikos.de](mailto:mail@barikos.de)